

乗ったままクルクル回せて
ラクラクきれい!

車いすタイヤのクリーニングサポーター

クリサポ

特許出願済



外出後の車いすのタイヤ掃除、大変じゃないですか？
クリサポがあれば楽々お掃除！クリーン&スムーズに帰宅できます！

- ☆☆ 移乗不要！車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。
- ☆☆ 使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。
- ☆☆ スロープで玄関の低い段差を解消できます。
- ☆☆ コンパクトなので外出時に持ち運びできます。


車いす利用者と介助者、お互いのタイヤ掃除の負担を減らして、
もっと気軽にお出かけしましょう。





車いすタイヤのクリーニングサポーター **クリサポ**

■製品仕様

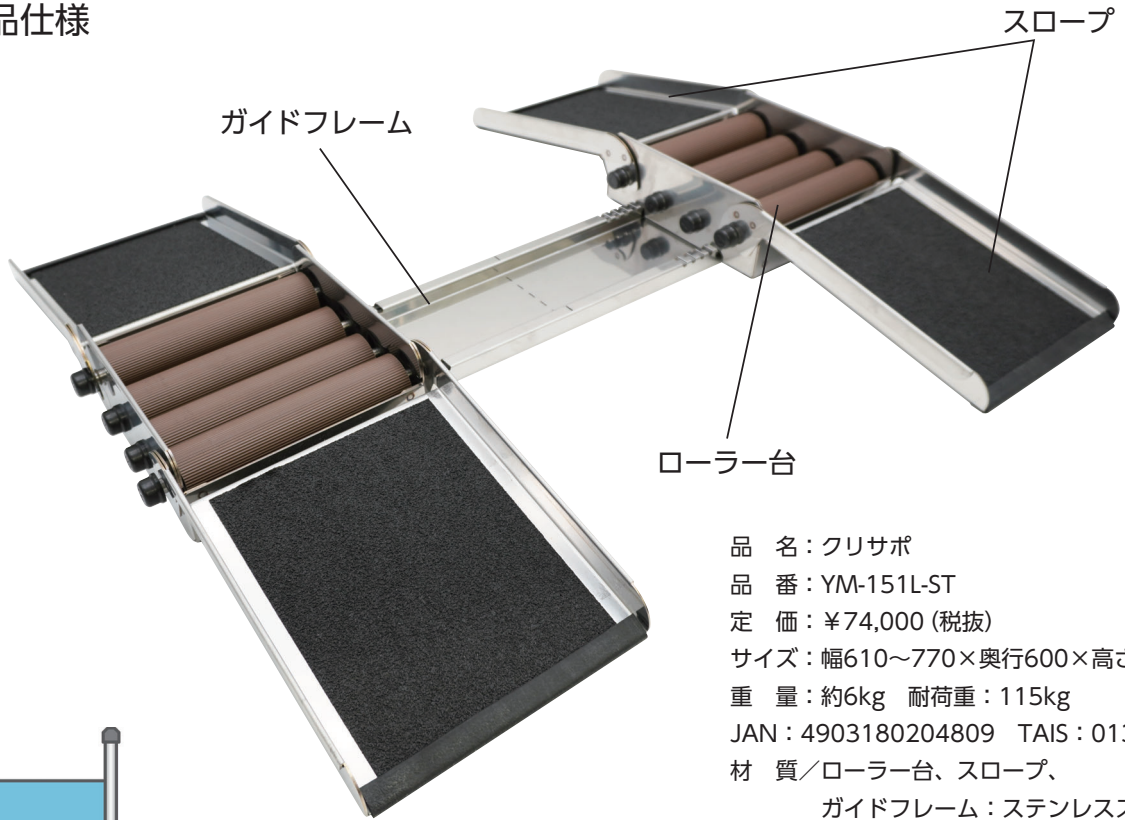


品名：クリサポ
 品番：YM-151L-ST
 定価：¥74,000 (税抜)
 サイズ：幅610~770×奥行600×高さ71mm
 重量：約6kg 耐荷重：115kg
 JAN：4903180204809 TAIS：01339-000149
 材質/ローラー台、スロープ、
 ガイドフレーム：ステンレススチール
 ローラー：塩化ビニル樹脂







適合車いすサイズ

- ① 28cm以上 (キャスター内寸)
 - ② 68cm以内 (後輪外寸)
 - ③ 12cm以内 (キャスター内側～後輪外側)
- ※あくまで目安のサイズとなります。

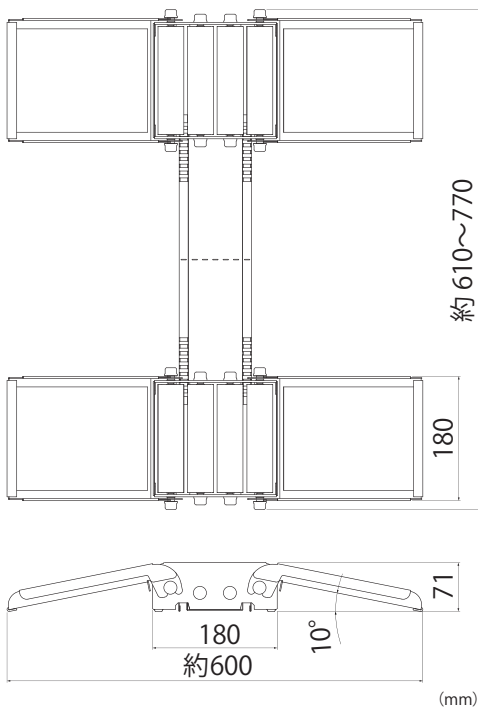

■使用方法

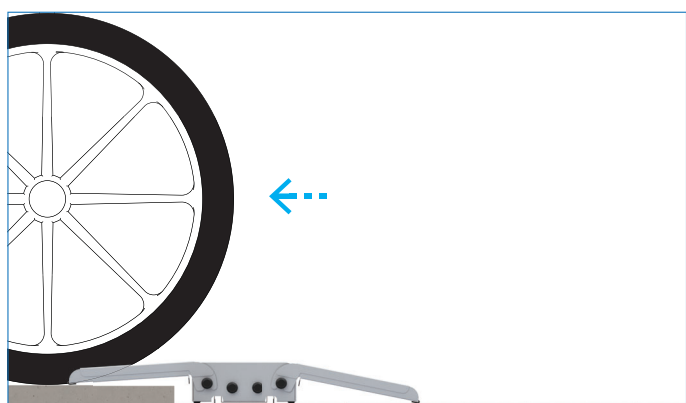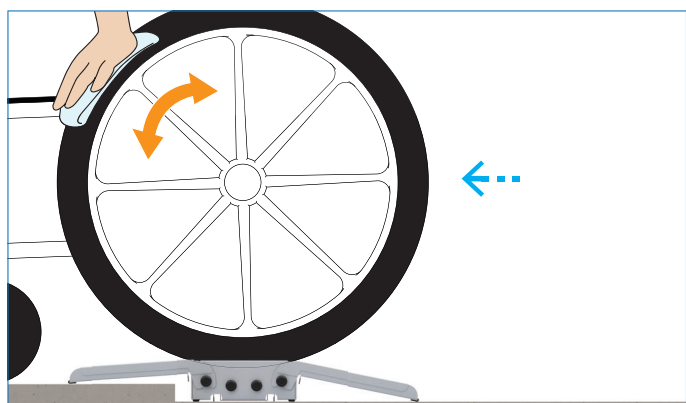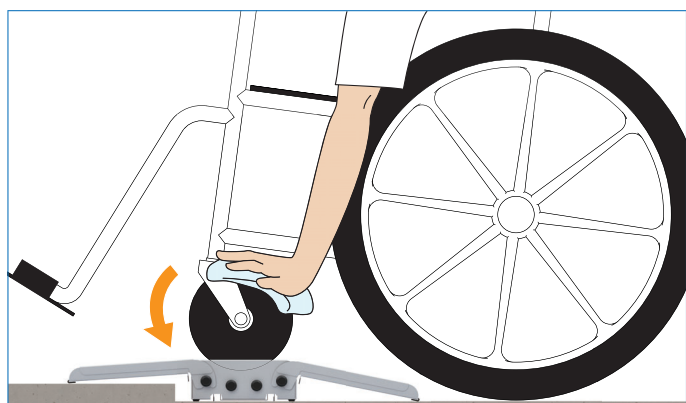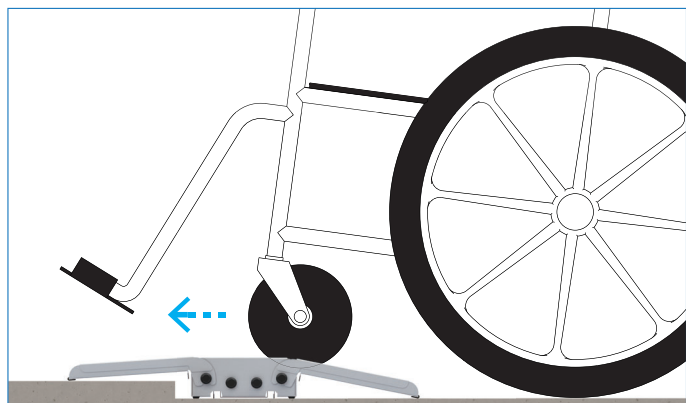

クリサポ 紹介動画はこちら

山崎産業 クリサポ  で検索



- ① 介助者が車いすを押し進め、スロープを上げて前輪をローラーに乗せる。

- ② ローラー上で前輪を回転させながら、介助者または利用者がぞうきん等で拭き上げる。
＜前輪の清掃完了＞

- ③ 介助者が車いすを押し進め、前進して後輪をローラーに乗せる。

- ④ ローラー上で後輪を手回ししながら、介助者または利用者がぞうきん等で拭き上げる。



車いす利用者が拭き上げる場合のイメージ。

- ⑤ 介助者が車いすを押し進め、前進する。

☆☆ キレイになったタイヤで床を汚さず屋内へ！



「段差解消スロープ」としてご使用いただく場合、障害者総合支援法の日常生活用具給付等事業での対象となります。

※段差解消スロープとして市町村事業となりますので、申請する市町村へご確認ください。

カリサポ は様々なシーンでご使用いただけます。

自宅



介護施設



学校




体育館



旅館・ホテル



観光文化施設(美術館・神社仏閣など)

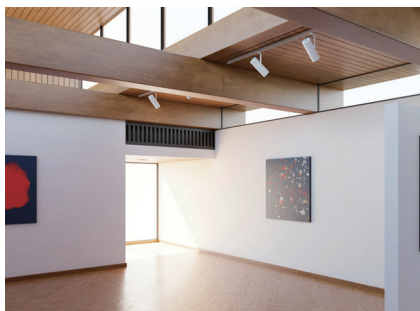

CONDOR 山崎産業株式会社

Trust of the Quality

(TAIS 企業コード No.01339)

第五営業本部

〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5 山崎産業東京総合センタービル4F

TEL (03) 5677-3430 FAX (03) 5677-3434

メールアドレス info5@yamazaki-sangyo.co.jp

※ご紹介する商品は印刷の為、お手もとに届く商品とは
多少色味が異なる場合があります。
※商品仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
(内容は2025年9月現在のものです。)



ホームページ

www.yamazaki-sangyo.co.jp

ISO 9001: 栃木工場・伊丹工場

・岡山工場

ISO 14001: 本社・栃木工場・伊丹事業所

・岡山工場



●お問い合わせは