

取扱説明書



- すべり止め安心マット クローバー #5
- すべり止め安心マット クローバー #6
- すべり止め安心マット クローバー #7
- すべり止め安心マット クローバー #8



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

⚠ 注意

- このマットは屋内用マットです。用途以外の使用はしないでください。
- 火気などは近づけないでください。変形や燃焼のおそれがあります。
- 平滑でない床面、ざらついた床面、カーペットなどでは使用しないでください。マットが密着しない場合があります。
- マットを床面に貼り付ける場合は裏面のフィルムをはがしてください。この時吸着面どうしがくっつかないように注意してください。床面のほこり、汚れ、水分などを拭きとり、貼りつけてください。
- マットを貼りつける時は全面をよく押さえて密着させて使用してください。密着不足の場合、マットの縁がはがれたり浮き上がり、つまづいて転倒するおそれがあります。すり足歩行の方が使用する場合は特にご注意ください。
- 長期間同じ場所に敷かないでください。床面が変色したり、マットが貼りつくおそれがあります。週に一度はマットをはがし、床面を空気に触れさせることでトラブルが防げます。はがした時に吸着剤が床に付着した場合はぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。
- マットが濡れた場合は拭き取ってください。濡れた状態で衣服などに触れた場合、染料で汚れるおそれがあります。
- マットが濡れたまま使用しないでください。足が滑り転倒するおそれがあります。
- 床面やマットの吸着面が濡れている場合は貼りつかなくなります。しっかり乾燥させてから使用してください。
- 裏の吸着面どうしを合わせないでください。吸着面が貼りつき、離れなくなるおそれがあります。
- 使用しない場合は丸めて保管してください。
- マットを取り除く場合はゆっくりはがしてください。はがした後、床面がすべるおそれがあります。ぬるま湯または中性洗剤で拭き取ってください。
- 床清掃時に薬品を使用される場合はマットを取ってからおこなってください。
- 塩ビ系の床やワックスを塗った床などでは使用しないでください。変色するおそれがあります。
- 床暖房の効いた床では使用しないでください。マットが変形したり、吸着面が貼りつき離れなくなるおそれがあります。
- 製法上、マット表面にラインや色ムラが発生する場合がありますが、品質上問題はありません。
- 製法上、マット表面、裏面に異なる繊維が付着する場合がありますが、品質上問題はありません。
- 柄の配置はマットにより違いがあります。
- ドラム式洗濯機は使用しないでください。マットが変形したり、破損するおそれがあります。
- 乾燥機(タンブラー)、ドライヤー、アイロンは使用しないでください。マットが変形したり、吸着面が貼りつき、離れなくなるおそれがあります。
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。マットが変色や変質するおそれがあります。
- 洗濯機で洗う場合はぬるま湯または水で洗濯ネットに入れて弱水流にしてください。洗濯後は風通しのよいところで陰干ししてください、また裏面が見えるように干してください。
- 洗剤は衣料用を使用し、「注意書き」をよくお読みの上、正しく使用してください。

■特長

- 表面は適度なまさつがありスリップしにくく安全に歩行できます。
- 裏面は吸着性素材で床面に密着しめくれにくく安全に使用できます。

■廃棄される場合

- 廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。



山崎産業株式会社

第五営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル 4F
TEL (03) 5677-3430 FAX (03) 5677-3434
MAIL info5@yamazaki-sangyo.co.jp
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp

20201225