

浴槽、浴室での滑りを防止する

バスらぎ ショー マット

■はじめに このマットは入浴時の身体の滑りを抑えるものですが、入浴時における事故全てを防げるものではありません。安全な環境を整えた上で、ご使用前に「注意」「警告」をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書はお読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。

■使用方法 浴室またはお湯を張った浴槽内の底面に平らに敷きます。マットの中心部に真上からゆっくり足を下ろし、ご使用ください。 ※マットはゆっくり洗いますが、浴槽内は水流で動きがあるものです。適切な入浴位置にセットし、安定を確認の上ご使用ください。

■適さない材質

ステンレス／木／ホーロー
石材 (大理石、磁器タイル、小石敷きの床等)

上記材質でのご使用はお控えください。また、上記材質以外でも、メーカー等の条件により個体差がありますので、滑らないかを必ずお確かめの上ご使用ください。

■お手入れ方法

- 中性洗剤を染み込ませた柔らかいスポンジで水洗いをし、その後よくすすいでください。中性洗剤で落とすきれない場合、市販のお風呂用塩素系漂白剤の使用も可能です。使用後は中性洗剤同様よくすすいでください。
- お手入れに使用できない素材…金属タワシ／硬いブラシやスポンジ／強酸・強アルカリ性の薬剤／シンナー／ベンジン 等

警告 誤って使用すると **死亡／重傷などを負う可能性** がある内容を明記しています。

使用上のご注意 誤って使用すると **傷害／財産への損害が発生する可能性** がある内容を明記しています。

お守りいただきたい内容の種類を、右記の表示(図記号)で区分し、説明しています。





必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。




してはいけない「禁止」内容を説明しています。

警告



- ①「おもて」と記載されている面を上を設置し、必ず裏面全体が平らな床面に接した状態でご使用ください。
- ①設置する際は排水口の上に被さらないよう設置してください。
- ①入浴剤を使用した状態や、石鹸水がついた状態では、滑り止め効果が弱くなりますのでご注意ください。
- ①ぬめりや汚れが付着した状態でも滑り止め効果が弱くなりますので、定期的な中性洗剤等で洗い落としてください。
- ①すり足(足を引きずるような歩行)では、マットにつまずきやすくなります。十分に注意してご使用ください。
- ①使用者が自身の体勢を十分に安定させられない場合は、必ず介助者付添いのもとご使用ください。
- ①擦り減り、亀裂、白化、変形、反り等の劣化が見られた場合速やかに使用を中止してください。
- ①皮膚などに異常があった場合は使用を中止し、速やかに医師の診断を受けてください。

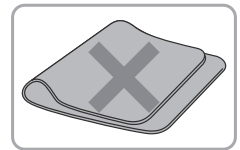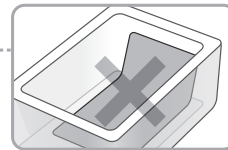


- 背中を斜めにもたれた状態で入浴される場合、十分に圧力が加からず水平方向へマットが動く可能性があります。

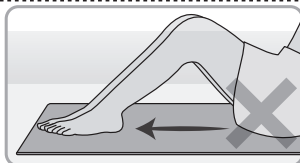

- 蹴るような動作をしたり、端部に大きく力を加えると危険です。

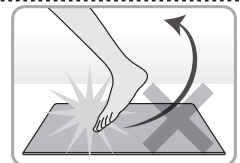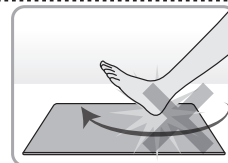

- その他水平方向へ大きく力が加わる体勢での使用は避けてください。
- マットの上に物を置いたり、重ねて設置したりしないでください。破損、怪我の原因となり大変危険です。
- マットはカットして使用しないでください。亀裂が入り、破損、怪我の原因となります。
- 赤ちゃんを抱えた状態、物を手に持った状態等、不安定な体勢になりうる状態で使用しないでください。
- 24時間風呂などでは使用しないでください。劣化の原因となります。
- ブローバス等の気泡浴での使用ではマットが動く可能性があります。マットが動く環境では使用しないでください。
- 火気等は近づけないでください。火災、破損、変形の原因となります。

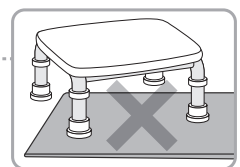

使用上のご注意

- 浴室、浴槽以外には使用しないでください。それ以外の場所で使用した場合は床面が滑る事があります。マットを取り除いた後は必ず床面を中性洗剤、または市販のアルコール除菌剤を含ませた布で拭いてください。
- ①マットの浴槽への設置は、お湯を張った後に行ってください。
- ①追い炊きをされる場合、マットが水流の影響を受けやすくなります。安定を確認の上ご使用ください。
- ①漂白剤を使用する際は必ず市販のお風呂用(塩素系)の物をご使用ください。それ以外の物を使用すると劣化の原因となります。
- ①染髪剤や色のついた入浴剤が付着すると、変色する場合があります。変色の著しい場合は使用を中止してください。
- ①マットを洗う際、硬いブラシ及び硬いスポンジ、強酸、強アルカリ性の薬剤、シンナー、ベンジン等は使用しないでください。劣化の原因となります。
- 洗濯機や乾燥機は使用しないでください。破損、劣化の原因となります。
- マットを折り曲げた状態で長期保管しないでください。
- 屋外に放置したり直射日光に当てないでください。劣化の原因となります。

品質表示	
材質	シリコンゴム

MADE IN CHINA



紙



プラ

外箱 透明シート

CONDOR
Trust of the Quality

山崎産業株式会社

第五営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目10番12号
TEL (03)5777-2002
MAIL Info2@yamazaki-sangyo.co.jp

ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp