

入稿用版下		
2021.09.10		
再入稿日付	依頼者	修正内容
商品名： 楽起（らっきい）用ベースマットⅡ 楽起（らっきい）狭所用ベースマットⅡ		
副資材名：取扱説明書		
制作ソフト： Adobe Illustrator CS6 入稿ソフト： Adobe Illustrator CS6		
使用色： スミ1C		
■		
■		
取付サイズ	： W182mm×L257mm（展開サイズ）	
取付材質	： 土質紙 90g	
取付加工	： なし	

取扱説明書



- 楽起（らっきい）用ベースマットⅡ
- 楽起（らっきい）狭所用ベースマットⅡ



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。



注意

- このマットは床置き式手すり「楽起用ベースマット」です。用途以外の使用はしないでください。
- 〈設置する場合のご注意〉
- マットをベースに貼りつける前に、裏面の離型紙が貼られている状態で支柱を通す箇所を丸いミシン目に沿ってはさみで切り取ってください。
- マットをベースに貼りつける場合は裏面の離型紙をはがしてください。この時粘着面どうしがくっつかないように注意してください。ベース板のほこり、汚れ、水分などを拭き取り、位置を合わせて貼りつけてください。
- すでにベースに支柱が取り付けられているものに貼りつける場合は、丸いミシン目とその間のミシン目を切り取って、支柱の上からかぶせるようにして貼りつけてください。その際、指などをけがさないよう注意してください。
- マットを貼りつける時は全面をよく押さえて密着させて使用してください。密着不足の場合、マットの縁がはがれたり浮き上がり、つまづいて転倒するおそれがあります。すり足歩行の方が使用する場合は特にご注意ください。
- 〈使用する場合のご注意〉
- 火気などは近づけないでください。変形や燃焼のおそれがあります。
- マットをベースに長期間貼り付けたままにしないでください。マットがはがれにくくなる場合があります。週に一度はマットをはがし、ベース面を空気に触れさせることでトラブルが防げます。はがした時に粘着剤がベースに付着した場合はぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。
- マットが濡れたまま使用しないでください。足が滑り転倒するおそれがあります。
- ベース面やマットの粘着面が濡れている場合は貼りつかなくなります。しっかり乾燥させてから使用してください。
- 裏面の粘着面どうしを合わせないでください。粘着面が貼りつき、離れなくなるおそれがあります。
- 使用状態や経年変化により変形・破損などが起こる場合があります。変形・破損などの不具合が生じた場合は新しいものに取り替えてから使用してください。
- 製法上、マット表面に色ムラが発生する場合がありますが、品質上問題はありません。
- 製法上、マット表面、裏面に異なる繊維が付着する場合がありますが、品質上問題はありません。
- 製法上、マット裏面の離型紙にシワが発生する場合がありますが、品質上問題はありません。
- 〈お手入れする場合のご注意〉
- マットを洗う場合はドラム式洗濯機は使用しないでください。マットが変形したり、破損するおそれがあります。
- 乾燥機（タンブラー）、ドライヤー、アイロンは使用しないでください。マットが変形したり、粘着面が貼りつき、離れなくなるおそれがあります。
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。マットが変色や変質するおそれがあります。
- 洗濯では他の洗濯物といっしょに洗わないでください。粘着面に貼りつくおそれがあります。

■使用方法

- 床置き式手すり「楽起」「楽起狭所用」のベースに貼り付けて使用してください。

■お手入れ方法

- マットをベースからはがす場合はゆっくりはがしてください。はがした後、ベース面をぬるま湯または中性洗剤できれいに拭いてください。
- ベース清掃時に薬品を使用される場合はマットを取ってからおこなってください。
- 洗濯機で洗う場合はぬるま湯または水で洗濯ネットに入れて弱水流にしてください。洗濯後は風通しのよいところで裏面の粘着面どうしをくっつかない様に注意して陰干ししてください。
- 洗剤は衣料用を使用し、「注意書き」をよくお読みの上、正しく使用してください。

■保管方法

- 使用しない場合は丸めて保管してください。

■廃棄される場合

- 廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。

お問い合わせ、その他楽起シリーズなどメディカル用品紹介ページはこちらからご覧いただけます。



CONDOR
Trust of the Quality
山崎産業株式会社

第五営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル 4F
TEL (03) 5677-3430 FAX (03) 5677-3434
MAIL info5@yamazaki-sangyo.co.jp
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp